



Réalisation d'un frottis sanguin

1° Matériel utilisé :

- Une lame dégraissée à l'alcool.
- Une lame (ou un étaleur) à bords rodés.
- Un échantillon de sang.

2° Technique de réalisation :

- Déposer une goutte de sang sur la lame dégraissée, à environ 1 cm du bord.
- Placer la lame rodée (ou l'étaleur) contre la lame dégraissée et la goutte de sang.
- Attendre que la goutte de sang s'étale sur la largeur de la lame rodée (ou de l'étaleur).
- D'un mouvement régulier, glisser la lame rodée (ou l'étaleur) vers l'extrémité de la lame dégraisser.
- Faire sécher le frottis puis procéder à la coloration de ce frottis.

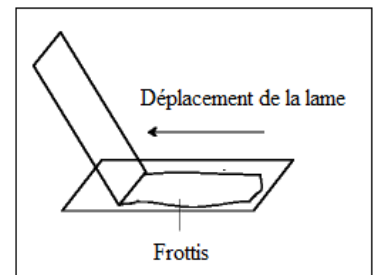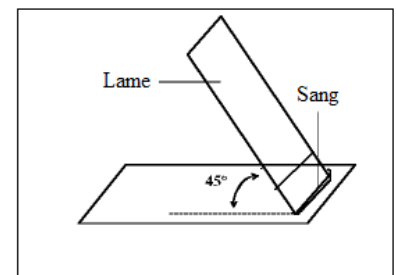

3° Critères d'un bon frottis :

- De bonne taille (1/2 à 3/4 de la lame).
- De bonne densité.
- Goutte étalée entièrement.
- Distant des bords de la lame.