

Flottation de Willis

C'est une technique de concentration.

Les selles diluées dans la solution saturée de NaCl et tamisées sont versées dans un tube à essai jusqu'à affleurement du liquide aux bords du tube.

- Appliquer une lamelle sur le tube sans laisser de bulle d'air entre le liquide et la lamelle qui sera d'une taille suffisante pour recouvrir tout l'orifice.
- Après 15 minutes environ, retirer la lamelle délicatement et la poser sur une lame. Examiner immédiatement avant la cristallisation du sel par dessiccation.

C'est une technique relativement simple qui convient aux œufs légers.