

## Identification de Staphylococcus aureus par coagglutination

### Réactifs :

- Hématies témoins.
- Hématies porteuses d'immunoglobulines anticapsulaires de SARM, d'immunoglobulines fixées par le paratope et de fibrinogène humain.

### Technique :

Déposer sur une lame une goutte de chaque réactif après les avoir soigneusement homogénéisés.

Disperser soigneusement une à deux colonies dans chacune des gouttes.

Donner à la lame un léger mouvement de rotation.

Lire.

### Lecture :

- Si agglutination visible, confirmation de l'identification de Staphylococcus aureus.
- Si aucune agglutination, autre que Staphylococcus aureus.