

MIF concentration

C'est une technique de concentration.

- Dilution au 1/10 des selles dans le liquide MIF.
- Tamisage.
- Transvaser 10 mL dans un tube à centrifuger, ajouter 4 mL d'éther et agiter énergiquement.
- Laisser reposer 2 minutes.
- Si l'émulsion reste stable, centrifuger pendant 1 minute à 1700 tours/minute.

Si l'éther surnage, ajouter 1 mL d'eau du robinet et agiter de nouveau. Vérifier la stabilité de l'émulsion avant de centrifuger. Si nécessaire ajouter de nouveau un peu d'eau.

- Examiner le culot.