

Technique de Junod

C'est une technique de concentration.

- On effectue une MIF concentration ou une concentration de Bailenger, en utilisant peu d'éther et en agitant modérément ce qui laisse un gros culot.
- Le culot est repris dans une solution de sulfate de zinc à saturation. Centrifugation de 30 secondes à faible vitesse.
- Utilisation du liquide surnageant après la centrifugation (ce liquide est dilué au quart avec de l'eau distillée et centrifugé). On examine le culot ainsi obtenu.

Reprendre ce culot dans une solution d'iodomercurate de potassium de densité 1,6, centrifuger, prélever et diluer tout le surnageant, centrifuger et examiner le culot.