

## Techniques d'extraction de Baermann

Mettre 10 à 20 g de selles dans une passoire métallique tapissée d'une ou deux couches de gaze ou d'une couche unique de papier très fin, si les selles sont fluides.

Mettre de l'eau chaude dans l'entonnoir jusqu'au tiers de la hauteur.

Placer la passoire et les selles dans l'entonnoir (le niveau de l'eau doit effleurer la partie inférieure des selles enveloppées).

Deux à trois heures plus tard soutirer le liquide et le centrifuger à 1500 tours/minute pendant 5 minutes.

Rechercher les larves dans le culot que l'on aura prélevé avec précautions. Les larves vivantes seront observées au microscope ou à la loupe.

Au lieu de centrifuger le liquide, il est aussi pratique de vider l'entonnoir dans une boîte de Petri et de rechercher les larves à la loupe binoculaire.